

どんな状況でも、曇らない。

フィルムの透明度と平滑度、そして高度な防曇効果。
すべてに世界最高レベルのクオリティを実現。

MeGUARD

HIGH QUALITY FACE GUARD IN THE MEDICAL FIELD

手術の現場における飛血・飛液から顔面を守り、感染などを防ぐ高品質フェイスガード。

今までになかったハネ上げ式、常時着用でいつでもON・OFF切替使用。

カチューシャのように常に身につけられます。

新技術により、常にクリアな視界をキープ。手術用フェイスガード【ミーガード】

フィルム交換式

使い捨てタイプだから、いつも清潔・快適な使い心地をお約束します。

はね上げ可能

フィルムが邪魔なとき、上にはねあげることができます。

眼鏡との併用可能

カチューシャ式なので眼鏡をかけた状態でも可能で鼻への負担もありません。

かんたん交換

フィルムの着脱はとても簡単で、調節もラクに行えます。

ミーガード 本体

ガンメタリック MEG-1-GM	MeGUARD	イエロー MEG-1-Y
ブルー MEG-1-B	MeGUARD	グリーン MEG-1-G
ライトブルー MEG-1-LB	MeGUARD	フレッシュグリーン MEG-1-FG
プリズムラベンダー MEG-1-PL	MeGUARD	ライトグリーン MEG-1-LG
ピンク MEG-1-P	MeGUARD	シルバーグレー MEG-1-SG
レッド MEG-1-R	MeGUARD	シャンパンゴールド MEG-1-CG
オレンジ MEG-1-O	MeGUARD	サクラ MEG-1-S

○カラー14色 ○価格(1本)/1,600円(税別)

フィルムL / フルフェイス




MEG-1F(L)

○寸法/
W248mm×H209mm×T0.13mm
○1パック10枚入り
○価格/3,200円(税別)



(装着イメージ)

フィルムM / ハーフフェイス

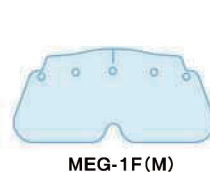

MEG-1F(M)

○寸法/
W247mm×H123mm×T0.13mm
○1パック10枚入り
○価格/2,000円(税別)



(装着イメージ)



MeGUARD ミーガード 取扱説明書


お願い: フィルムは、高度な技術により生産されておりますが、フィルム全面からキズや汚れを避けて裁断することが困難なため、正面の視野内に認識できないものは許容範囲とさせていただきます。また、一度ご使用になられた後のキズ・汚れは交換の対象になりません。

仕様の用途


本製品は微小な粉塵や水滴程度の液体の飛沫などから、出きるだけ眼、顔を保護することを目的としています。
※本製品は使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

POINT 1 簡単装着

フィルムを固定する箇所は、ストッパー3ヶ所、フィルムずれ防止の凸が2ヶ所あります。まず可動フレーム中央部にあるストッパーの筒①にフィルムの穴①を押し込んで、フタをするようにホック④で固定します。次に、コーナー付近の凸②にフィルムにある小さな穴②をはめ込みながら、左右の側部にある筒③にフィルムの穴③を押し込んでホック⑤で固定します。

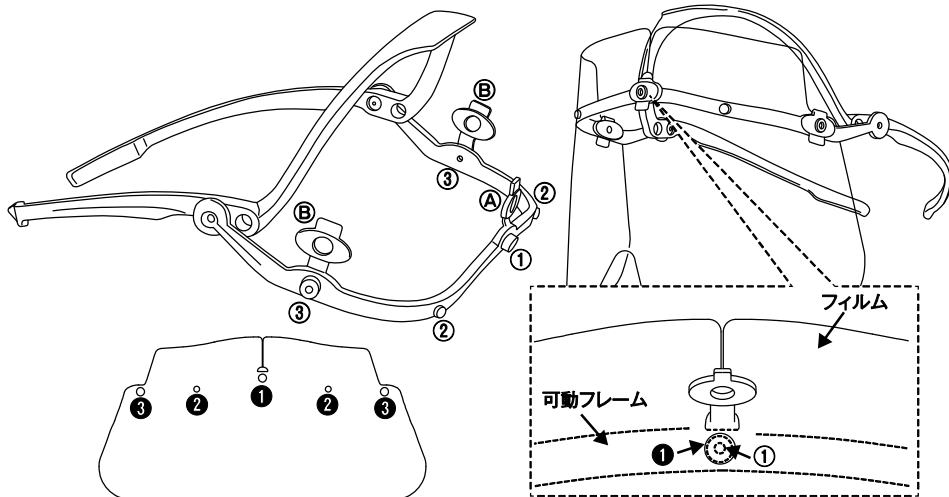

POINT 2 簡単調節

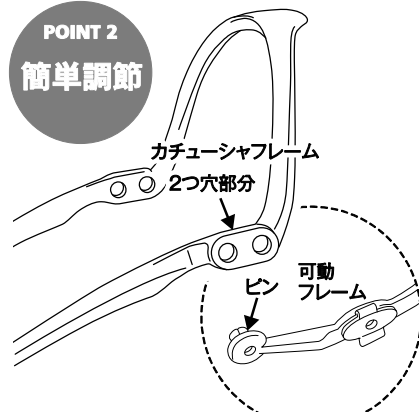

- ◎カチューシャフレームと、可動フレームは可動フレームに設けられたピンで連結されています。
- ◎双方の連結部の元を持って平行に引き離すとピンが抜けて、可動フレームを外すことが出来ます。
- ◎カチューシャフレームの左右にある、片側2つ穴から使い易い位置を選び、再び連結して下さい。
- ◎連結する場合は、可動フレームのピンを真つぐ穴に押し込んで連結して下さい。

注意

取扱を誤った場合に、ケガや物的損傷を負う可能性があります。

使用上の注意

- ①本製品(フレーム及びフィルム)は滅菌されていません。有機溶剤など、不適当な薬品を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないで下さい。
- ②防曇フィルム(MEG-1F)には片面に保護シートが貼られています。フレームに取り付ける際には保護シートが貼られた状態のまま装着して下さい。また、必ず保護シートを取り外してご使用下さい。保護シートが貼られた状態で使用すると視野が曇り危険です。
- ③フィルムの厚さは約0.1~0.2mmと薄く、また透明度が高いため、目がフィルムを認識し損なうことがあります。眼・手・顔などに怪我をしないよう、注意してご使用下さい。
- ④フィルムに付着した汚れは視界を低下させ安全の妨げになります。汚れたフィルムや複数回の使用は危険です。毎回新しいものにお取り替え下さい。
※フィルムは単回使用の使い捨てです。
- ⑤ご使用前には必ずフレームとフィルムの取り付け状態、可動フレームとカチューシャフレームの結合状態、フィルムのキズ、汚れなどを点検し、異常が無い事を確かめてから、上下を間違わないように正しく装着して下さい。
- ⑥ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですで行わないで下さい。

取扱上の注意

- ①フレームクリーニングは、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で手洗いし、水洗いの後に柔らかい布、あるいは柔らかい紙でふき取して下さい。
- ②フレームの消毒、滅菌には、無水エタノール、又は、次亜塩素酸ナトリウムを6%程度に薄めた溶液をご使用下さい。ガス、熱(煮沸)、及び有機溶剤等、不適当な薬品の使用は、製品の劣化、破損の原因となりますので使用しないで下さい。

商品名	品番	販売単位	定価(税別)	JANコード
ミーガード本体 ブルー	MEG-1-B	1本	1,600円	4580358030011
ミーガード本体 レッド	MEG-1-R	1本	1,600円	4580358030028
ミーガード本体 ピンク	MEG-1-P	1本	1,600円	4580358030158
ミーガード本体 ライトブルー	MEG-1-LB	1本	1,600円	4580358030165
ミーガード本体 ライトグリーン	MEG-1-LG	1本	1,600円	4580358030172
ミーガード本体 シャンパンゴールド	MEG-1-CG	1本	1,600円	4580358030189
ミーガード本体 オレンジ	MEG-1-O	1本	1,600円	4580358030035
ミーガード本体 イエロー	MEG-1-Y	1本	1,600円	4580358030042
ミーガード本体 プリズムラベンダー	MEG-1-PL	1本	1,600円	4580358030196
ミーガード本体 フレッシュグリーン	MEG-1-FG	1本	1,600円	4580358030202
ミーガード本体 シルバークレイ	MEG-1-SG	1本	1,600円	4580358030219
ミーガード本体 ガンメタリック	MEG-1-GM	1本	1,600円	4580358030226
ミーガード本体 グリーン	MEG-1-G	1本	1,600円	4580358030233
ミーガード本体 サクラ	MEG-1-S	1本	1,600円	4580358030240
ミーガード専用交換両面防曇フィルム Mサイズ	MEG-1F(M)	1/パック10枚入り	2,000円	4580358030059
ミーガード専用交換両面防曇フィルム Lサイズ	MEG-1F(L)	1/パック10枚入り	3,200円	4580358030066

フレームの製品環境安全情報

- 【有害性情報】 本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用状態)に於いて、健康に害を及ぼすことはありません。
- 【発火温度】 カチューシャフレーム 約500℃ 可動フレーム約470℃
- 【燃焼時に発生するガス】 一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、アルデヒド煙、ニトリル化合物などが発生します。
- 【消火方法】 水、炭酸ガス、泡消火剤、粉末消火剤などにより、一般の火災と同じ消火方法が有効です。
- 【廃棄上の注意】 廃掃法及び地方自治体の条例に従い廃棄して下さい。焼却処分する場合は、廃掃法、大気汚染防止法、水質汚染防止法に従って処理して下さい。
- 【保管上の注意】 直射日光を避け、推奨(気温15℃~20℃、湿度45%~55%)の場所に保管し、製品、包装に水、溶剤、ガスなどをかけないで下さい。

本製品は滅菌されていません。

カチューシャフレーム(ABS製) 耐熱温度 約70℃
可動フレーム(PP製) 耐熱温度 約120℃
重量: 約20グラム(Mフィルム付き)
約23グラム(Lフィルム付き)

※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

フィルムの仕様

MEG-1F(M) ◎Mサイズ【ハーフフェイス】 顔の上半分を保護
size:w247mm×h123mm×t0.13mm

MEG-1F(L) ◎Lサイズ【フルフェイス】 顔全体を保護
size:w248mm×h209mm×t0.13mm

製品の素材: トリアセチルセルロース (triacyetyl cellulose)

原産国 フレーム全体 中国 / フィルム部 日本

発売元  MITAS
Medical Instruments, Technologies, And Services

株式会社 ミタス
〒918-8558 福井県福井市門屋町4丁目901
TEL 0776-24-0500 FAX 0776-24-0021 www.mitas-inc.co.jp

手術用フェースガード MeGUARD〈ミーガード〉を お使いのお客様へお願い

ミーガードをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ミーガードフレームの装着位置

※フレームをかける位置にご注目ください。

正しい装着例	誤った装着例
	

以下の原因でフレームが落下する可能性がありますので、先ずはご確認くださいをお願いしています。

1 装着位置の勘違いやズレがある場合。

当製品は、女性が多く利用するカチューシャをつける位置（個人により差はありますが）頭頂部付近に装着していただくことを想定して設計されており、この位置に正しく装着していただければ、テープにて固定する事無く、頭を振っても下を向いても簡単に落下することが無いようにフレームのカーブを工夫しております。

一般的なフェースガード（眼鏡フレームタイプ）と同様、額や前髪の生え際あたり（前頭部）に装着してしまうと、使用中にフレームごと落下する事象が起きてしまいます。

今一度、カチューシャをつける位置（個人により差はありますが）頭頂部付近に装着していただき、テープ固定をしなくても落下しないかをお確かめください。

2 フレーム本体が洗浄等による劣化や反復使用による経時変化で 角度が広がったり、弾力性が低下したりしている場合。

フレーム本体は恒久的に使用できるものではありません。新品のフレームと比較して、形状に広がりがない事や、劣化による弾力性の低下がないか確認していただき、変化が確認された場合は既使用製品の使用を中止して、フレーム本体を交換していただくことをお勧めしています。