



信頼のメーカーと創る、新しい価値。

ASOURCE®
[COLLABO]

最前線を守る、 確かな防護

3M™ 防護マスク

9502+N95

医療用

AC-01

3M



調整可能なノーズクリップ

ノーズクリップは簡単に曲がり、
軽く鼻に押し付けるだけで鼻の形に合い、
鼻の周りからの漏れ込みを軽減します



BMF フィルター

呼吸がラクで高い捕集効率を持つフィルターです



折りたたみデザイン

折りたたまれた個包装なので、
携帯や保管にも便利です



ニット素材のヘッドバンド

肌に優しい編みゴムでフィットを保ちます




BMFフィルター

3M™ 防護マスクは、BMF フィルターでミクロの粉じんを捕集するとともに型崩れしにくい構造です。

不織布技術を活かし繊維の目を細かく綿密にした繊維層フィルターに静電気を帯電させ、高い粒子捕集効率を持たせたフィルターです。

高温多湿の環境においても長時間にわたり、その電気的な性能は低下しません。

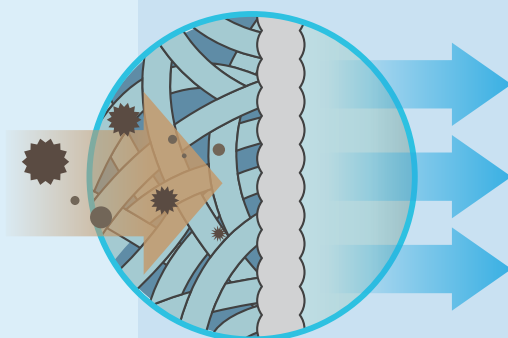

● 装着方法

①



ノーズクリップを上にして広げ、
が2本とも外に来るように持つ

②



マスクを顎から顔にあて、
上側のヘッドバンドを頭頂部につけます

③



下側のヘッドバンドを首の後ろに
まわします

④



両手の人差し指でノーズクリップが
鼻に密着するようにしっかりと押し当てます

⑤

ユーザー
シールチェック



両手でマスクを覆い、空気の漏れをチェック
してマスクの縁から空気が漏れる場合には
マスクの位置などを調整します。

動画で確認

装着方法、取り外し方法は
こちらからも確認できます



取り外し方法

①



マスクの首の後ろのヘッドバンドを外します

②



次に頭頂部のヘッドバンドを外します

③



マスクの表面には触れないように
マスクを顔から外し、各施設の規定に従い
廃棄または保管してください

品名	品番	入数
3M™ 防護マスク 9502+ N95 医療用	AC-01	1枚/袋・50袋/箱・10箱/ケース

販売元 スリーエム ジャパン株式会社

特約販売店 人に未来を。医療に明日を。



MEDIUS

連絡先



ミウル・ヘルスケア株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地2-10-2

☎ 0120-37-1640

受付時間／9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

「ASOURCE® COLLABO」は、メディアグループがメーカーと協働開発した製品です

お問い合わせ先



飢餓から救う。
未来を救う。
WFP
国連世界食糧計画

本製品の売上の一部を、国連WFP
のレッドカップキャンペーンに寄付
します。寄付金は国連WFPの「学校
給食支援」に役立てられます。

